




# NEBULIZER

3薬液内蔵式 3人用ネブライザー UNIT

TYPE

# 3S-97

- 1人毎に3個の大型噴霧器(100mlの薬液注入可)内蔵
- ネブライザー霧先用のエア送気口付
- コンプレッサーは強力なため、蓄圧タンクへのエア圧縮時間が短く、しかも低振動・低騒音です。

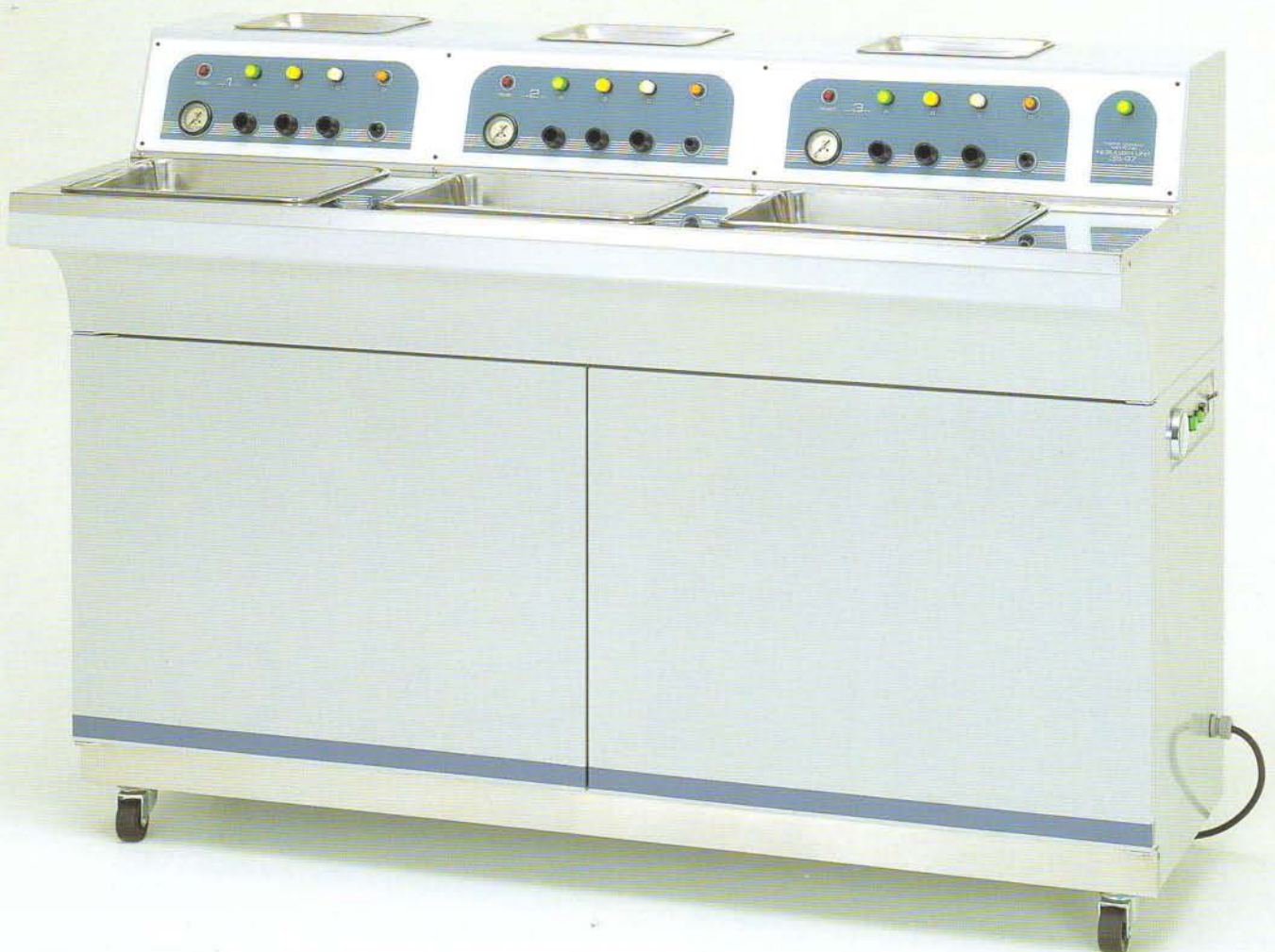

医療用具承認番号 (61B) 第72号

# 各部説明

## 使用圧調整器

通常0.1MPaにセットしてあります。必要に応じ0～0.15MPaに可変できます。

## リセットボタン

使用中に患者の状態、器械の作動に異常が生じた場合等、ただちに停止させることができます。

## 使用圧メーター

使用中の噴霧口または送気口にかかる圧力を表示します。必要に応じ使用圧調整器にて調整してください。

## 薬液噴霧口

付属の④噴霧ホースとガラス先(①②③)をセットします。大型噴霧器内の薬液が噴霧されます。この薬液噴霧口は、手ではずせるネジ式なので、大型噴霧器に配管された連結ホースと共に洗浄ができます。

大型噴霧器 薬液100ml注入可。

ステンレストレー 取りはずして洗浄可。



## タイマー

通常3分にセットしてあります。必要に応じ可変する場合はダイヤルを必要分数に合わせます。

## スタートボタン

スタートボタンを押すとボタンのランプが点灯し、タイマーで設定した時間だけ噴霧(送気)が行なわれます。

## エア送気口

ネブライザー霧先(オプション)を使用する時、この送気口に⑤送気ホースのジョイントを差し込んでください。

## スリッジョイント(大)

薬液注入、洗浄時に連結ホースから大型噴霧器を取りはずす時は、このジョイントを抜いてください。

## スリッジョイント(小)

スリッジョイント(大)と同様です。

## 元圧メーター

タンク内の圧力を表示します。

## コンプレッサー停止ボタン

コンプレッサー作動中に、一時停止させることができます。

## 電源コード

コードが長い場合、器械内に納めることができます。

## メインスイッチ

器械の主電源を保護するための過電流保護用ブレーカーです。

## 内部回路ヒューズ(3A)


コンプレッサー以外の内部回路を保護するためのヒューズです。

## 内部回路パイロット

正常時に点灯します。

フィルター  
(レギュレーター付)

メインパイロット

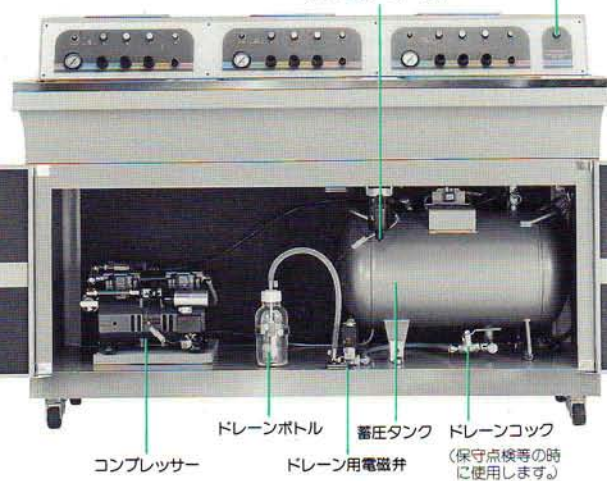

コンプレッサー

ドレーンボトル  
ドレーン用電磁弁

蓄圧タンク  
(保守点検等の時に使用します)

ドレーンコック

メインスイッチを切ると、タンク内の圧縮空気がドレーンと共にドレーンボトル内に排出されます。そのため従来のドレーン抜き作業がなくなり、またドレーンも溜まりにくく、時々ドレーンボトルをチェックするだけになりました。

## 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	550VA
コンプレッサー	ピストン型300W(オイルフリー)
排気流量	80ℓ/min
蓄圧タンク	30ℓ
エア圧縮時間	0～0.5MPa: 約120秒
元圧	0.15～0.5MPa(圧力スイッチで自動調圧)
二次圧	0.15MPa(レギュレーターで固定)
使用圧	0.1MPa(調整器で可変可)
タイマー設定	3分(可変可)
寸法	1300W×550D×950H
重量	105kg

## 付属品

ステンレスバット(170×210×30)	3	
ステンレスバット(260×325×40)	3	
ドレーンボトル	1	
⑤送気ホース(ジョイント付)	3	
④噴霧ホース(ジョイント付)	9	
大型噴霧器	9	
ガラス先	①喉頭用(マウスピース付)	3
	②鼻用(小)	3
	③鼻用(大)	3



◎ガラス製ネブライザー霧先  
霧先は付属品に含んでおりませんので、上記付属品の数をご確認の上、予備品とともにご注文ください。

## オプション

- ご希望により、外装の色指定ができます。
- 鼓膜マッサージ器が、左右側面にセットできます。
- マウスピース、マスク、プラスチック製ネブライザー霧先(分解型)

●製品は、改良のため予告なく変更することがあります。 ●製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。



製造元 MANUFACTURE  
株式会社 河西医療電機製作所  
KAWANISHI MEDICAL MANUFACTURING CORP.  
(〒113) 東京都文京区湯島2丁目5番8号  
5-8, 2-CHOME, YUSHIMA, BUNKYO-KU, TOKYO, 113  
TEL. (03)3814-5556 FAX. (03)3814-5529

代理店 AGENT