



SINCE 1922

# AUTOMATIC NEBULIZER UNIT A-97

防音タイプの3人用ネブライザー装置



KAWANISHI IRYO DENKI SEISAKUSHO  
TOKYO JAPAN

# AUTOMATIC NEBULIZER UNIT A-97



## 各部説明

### ●電源スイッチ

アース、電源コードを接続後、電源スイッチをONにするとメインパイロットが点灯し、コンプレッサーが作動、タンク内に蓄圧、使用可能状態となります。また、この電源スイッチはブレーカーを兼ねています。

### ●コンプレッサー格納防音ボックスおよび、コンプレッサー

コンプレッサーから発生する騒音を外部にもれないよう防音ボックスに収納、従来にくらべ4～5ホン低下し、かなり静かな作動音となりました。内部のオイルフリーコンプレッサーは、エアータンク内に1.5～5kg/cm<sup>2</sup>の圧力を保つようセットしており、タンクからフィルター、減圧弁を介しクリーンエアを送気口に送ります。

### ●スタート(作動)ボタン

押しとボタンのランプが点灯し、送気口からタイマーで設定した時間だけ送気が行なわれます。

### ●タイマー

1回の使用送気時間を出荷時、3分にセットしてあります。必要に応じ任意の時間に調整できます。

### ●停止ボタン

使用中で停止させたい時、または間違っスタート(作動)ボタンを押した時など、このボタンを押して送気を停止させます。

### ●使用圧調整器

送気するエアの圧力は0.8kg/cm<sup>2</sup>にセットしてありますが、必要に応じ1.5kg/cm<sup>2</sup>まで使用圧力計を見ながら調整することができます。

### ●コンプレッサースイッチ

つまみを引くと、コンプレッサーのみ停止させることができます。

### ●ヒューズホルダー

内部の電磁弁およびタイマー、スタートボタン等の操作回路保護用ヒューズです。(3A)

※特注製作——同一タイプの4人用、5人用の機種も製作いたします。

## 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	520W
コンプレッサー	日立製オイルフリーベピコン400W
エアータンク	30ℓ
元圧	1.5～5kg/cm <sup>2</sup> 二次圧1.5kg/cm <sup>2</sup>
使用圧	0.8kg/cm <sup>2</sup> 可変可(1.5kg/cm <sup>2</sup> まで)
タイマー	3分、可変可
外装	メラミン焼付塗装・ステンレステーブルカバースタ法・重量
	1300W×500D×880H・100kg

## 付属品

ステンレスパット(300×230×40)	3
薬瓶	5
送気ホース(中間ジョイント付)	3
予備ホース(2m)	1
2P変換コネクタ	1
アース線	1

※製品改良のため予告なく変更する場合があります。



製造元

株式会社 河西医療電機製作所

〈〒113〉東京都文京区湯島2丁目5番8号

TEL. (03) 814-5556

FAX. (03) 814-5529

代理店