



KAWANISHI

PORTABLE NEBULIZER-MOTOR

携帯用ネブライザーモーター TYPE 76

クリーンエアー

小型軽量



KAWANISHI MEDICAL MANUFACTURING CORP.
TOKYO JAPAN

日立製特注コンデンサーモーターを使用、ダイヤフラム方式のためクリーンエアを送気します。小型・軽量で噴霧圧力が強く、操作が簡単なので、病院はもとより、ご家庭で、外出先でのネブライザー治療に最適です。




使用および取扱い注意

- 送気口に送気ホース、ネブライザー、マウスピース等を接続し、電源スイッチを入れてご使用ください。
- 吸気口フィルターは、吸気する際に室内の空気を濾過します。目づまりすると黒ずんできて、噴霧圧力が弱まりますので、付属の新しいフィルターと交換してください。
- 使用後はネブライザーを送気ホースからはずし、流水で薬液を洗浄し(目づまりの原因となります)、良く乾燥させて次回の使用に備えてください。
- 本器の性能、仕様、使用目的等熟知し、正しくご使用ください。
- 本器を個人でご使用の場合、薬剤の選択や症状に応じた回数、時間等は、必ず主治医の適切な指示を受けてください。


仕 様

電 源	AC100 / 110V 50/60Hz
入 力	60VA
モーター	20W 日立コンデンサー起動
ポンプ	ダイヤフラム式
吐出圧	0.25MPa
吐出量	11L/min
寸法・重量	W120 × D250 × H195mm 4kg
PS E	製造販売届出番号 13B2X00233S45601
	EMC適合、一般医療機器(クラスI)、特定保守非該当

◎オプション「ガラス製ネブライザー霧先」の設置法

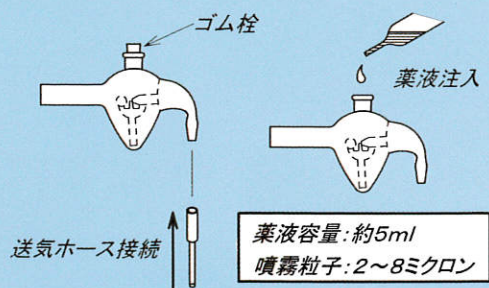

◎オプション「プラスチック製ネブライザー」の設置法

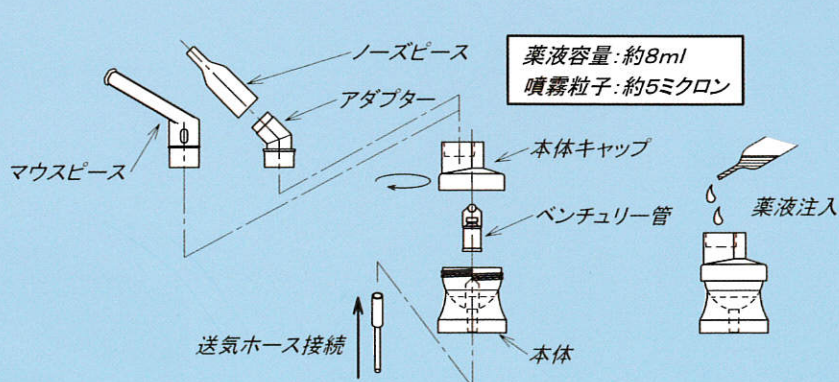

(横に倒すと、薬液がこぼれるので、注意してください。)

- 製品は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。



製造販売業・製造業・販売業・修理業
ISO 13485:2003 認証取得
(株) 河西医療電機製作所
〒113-0034 東京都文京区湯島2-5-8
TEL. (03) 3814-5556 FAX. (03) 3814-5529
URL <http://www.kawanishi-iryjo.jp>



代理店