




KAWANISHI

# TYMPANIC MASSAGE UNIT

鼓膜マッサージ器

# IC-58


- パワーコントロール（脈動の強弱調節）
- タイムコントロール（1回の使用時間設定）
- ウェーブコントロール（脈動波形の調節）
- スピードコントロール（脈動数の増減調節）

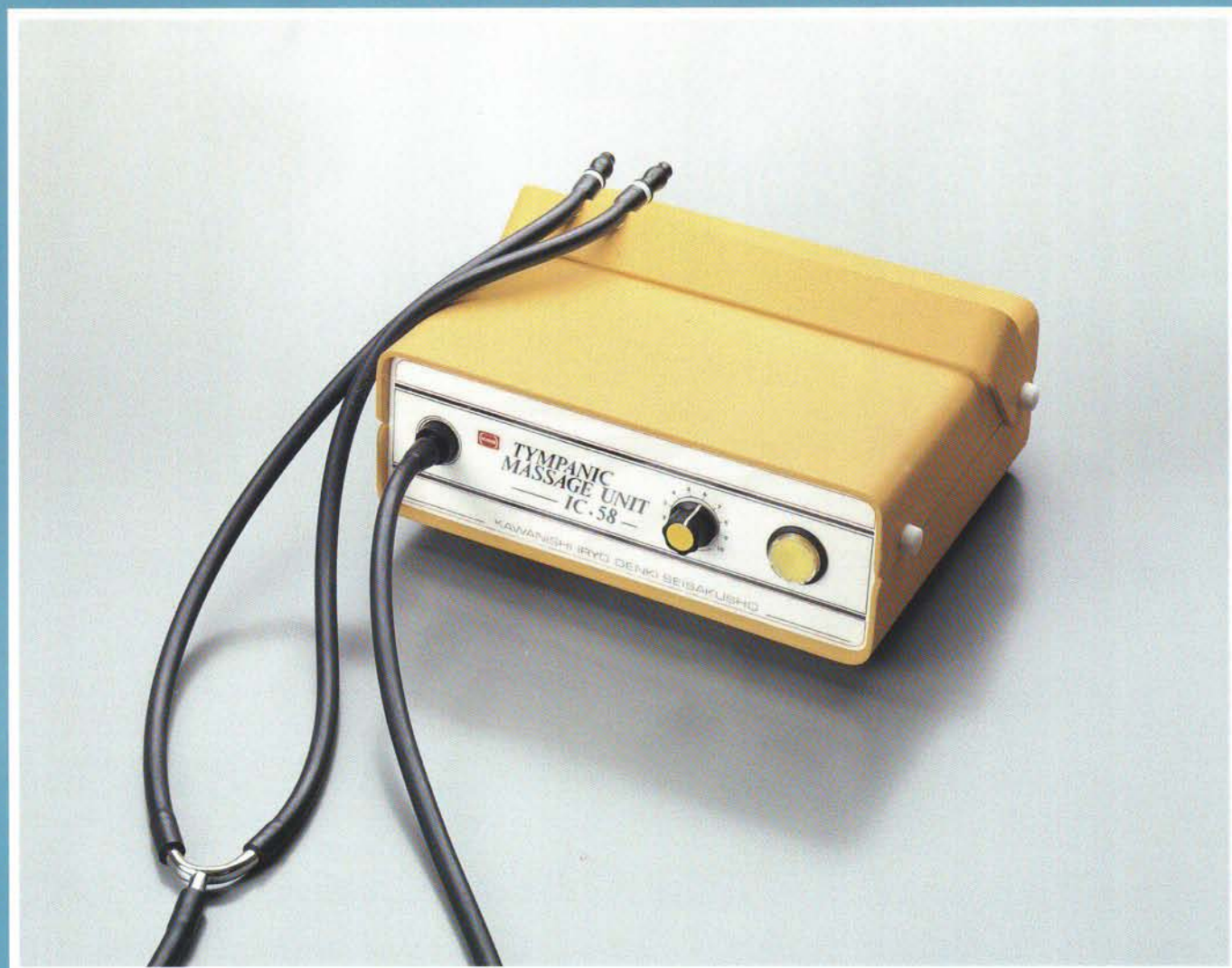

KAWANISHI MEDICAL MANUFACTURING CORP.  
TOKYO JAPAN

# TYMPANIC MASSAGE UNIT IC-58

## 各部名称

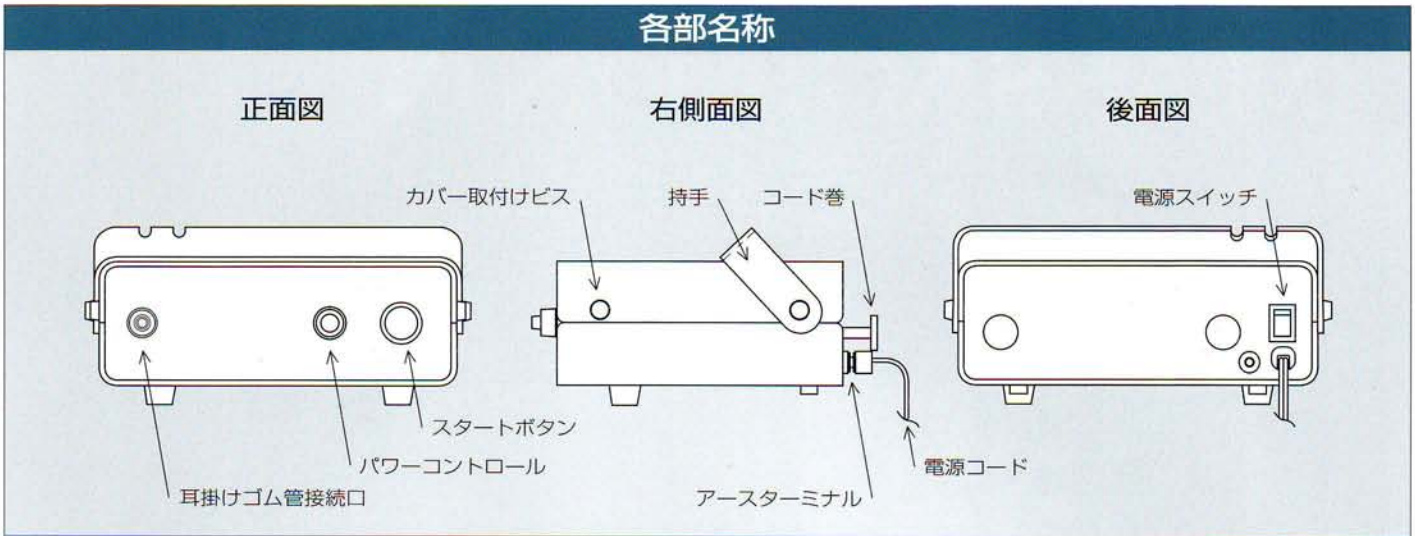

## 操作方法

- 1) 電源コード先を、家庭用電源コンセントに差し込んでください。
- 2) 後面のアースターミナルに付属品のアースコードを取付け、他方を建物のアースに接続してください。
- 3) 耳掛けゴム管接続口に耳掛けゴム管をセットし、他方を両耳に挿入してください。
- 4) 電源スイッチ、スタートボタンをONにすると、タイマー設定時間（出荷時は3分）だけマッサージが行なえます。
- 5) パワーコントロール（出力調整つまみ）で出力調整してください。（右に回すと出力が強く、左に回すと出力が弱くなります。）

## コントロール基板

本器は、タイマー・ウェーブ・スピードを必要に応じ、微調整する事ができます。ケースのカバー取付けビスを外すと、内部基板上に3ヶ所のダイヤルがあります。詳しくは、取扱説明書をよく読んでから、行なってください。

- **タイマー**  
使用時間最長6分まで調節できます。
- **ウェーブ**  
刺激の硬軟を調節できます。
- **スピード（減衰波の周波数）**  
刺激する回数を増減できます。

## 技術仕様

電源	AC100V 50/60Hz
入力	25VA
ポンプ	電磁ダイアフラム式
外装	塩化ビニール樹脂
承認番号	16000BZZ01651000
寸法	W226 × D203 × H103 (mm)
重量	2kg

## 性能

脈動波の最大圧力	9kPa
減衰波の周波数	7Hz
タイマーの時間	3分

## 付属品

耳掛けゴム管セット・アースコード

- 電撃に対する保護形式：クラスⅠ機器
- 電撃に対する保護の程度による装着部：B型装着部

- 製品は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。



製造元 MANUFACTURE 製造許可13BZ0193  
**株式会社 河西医療電機製作所**  
 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目5番8号  
**KAWANISHI MEDICAL MANUFACTURING CORP.**  
 2-5-8, YUSHIMA, BUNKYO-KU, TOKYO, 113-0034  
 TEL. (03) 3814-5556 FAX. (03) 3814-5529  
 URL <http://www.kawanishi-iryu.jp>

代理店 AGENT