



KAWANISHI

# PORTABLE NEBULIZER UNIT

携帯用ネブライザー

# TYPE S-76

使用目的に合せた噴霧力調節機構

一目でわかる噴霧圧カメーター

クリーンエア

シンプルなデザイン




電気用品型式認可 (▽第91-33341)  
医療用具承認番号 (60B) 第879号

KAWANISHI IRYO DENKI SEISAKUSHO  
TOKYO JAPAN

# Portable NEBULIZER UNIT Type S-76

河西医療電機の数々のネブライザー関連機器製作60年の経験と技術により、新しく開発したネブライザーS-76は、小型・軽量のコンパクトなハンディータイプです。

従来の機器に見られるボデー(鉄板)塗装のはがれからくる不潔感、不快感を解消し、また、軽量・振動音を押えるため樹脂成形ボデーとし、患者への威圧感をなくすシンプルなデザインにまとめました。コンプレッサーはダイヤフラム方式のクリーンエア、なおかつ使用目的に合せた噴霧力調節機構及び噴霧状態が一目でわかる噴霧圧力メーター、薬液瓶設置架台等、親切設計となっております。

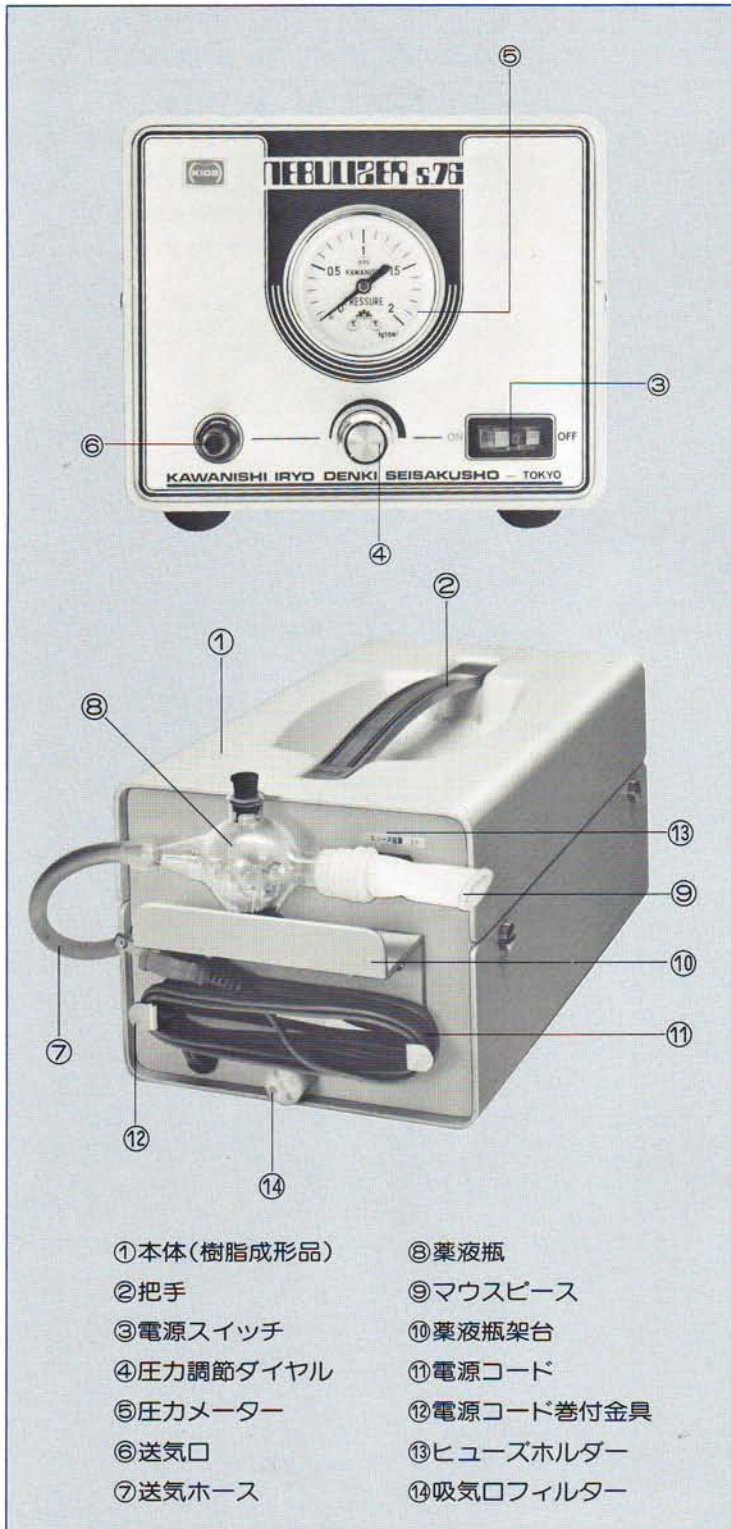

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ① 本体(樹脂成形品) | ⑧ 薬液瓶       |
| ② 把手        | ⑨ マウスピース    |
| ③ 電源スイッチ    | ⑩ 薬液瓶架台     |
| ④ 圧力調節ダイヤル  | ⑪ 電源コード     |
| ⑤ 圧力メーター    | ⑫ 電源コード巻付金具 |
| ⑥ 送気口       | ⑬ ヒューズホルダー  |
| ⑦ 送気ホース     | ⑭ 吸気口フィルター  |

## 用 途

咽喉頭炎、喘息、急性・慢性鼻炎、気管支炎、口内炎気管支炎  
拡張症肺気腫、肺炎、肺結核、百日咳等の疾病のほか、声楽家・  
歌手・講師の方など、のどを使うお仕事に従事する方にも最適  
です。

## 付 属 品

薬液瓶	1
マウスピース	1
送気ホース	1.3m
フィルター	2
アースコード	1

## 仕 様

電源：AC100V 50/60Hz  
消費電力：60/50W  
電動機：20W日立コンデンサー起動モートル  
コンプレッサー：ダイヤフラム方式  
コンプレッサー吐出圧：0~2.5kg/cm<sup>2</sup>  
薬液瓶(付属)装着吐出圧：0~0.8kg/cm<sup>2</sup>  
薬液瓶容量：≒ 5ml  
薬液瓶噴霧粒子：2~8ミクロン  
重量：5kg  
寸法：170(W)×320(D)×150(H)

## 使用上の注意

- 送気口に送気ホース、薬液瓶、マウスピースを接続し、電源スイッチを入れ圧力調節ダイヤルで噴霧状態を使用目的に合せ調節して下さい。(噴霧力の強弱により噴霧液の到達箇所が変わってきます。)吸気口フィルターは、送気する際に室内の空気を濾過します。目づまりすると黒ずんできて、噴霧力が弱まる場合がありますので、付属の新しいフィルターと交換して下さい。
- 本器の性能、仕様、使用目的等熟知し、正しくご使用下さい。
- 本器を個人でご使用の場合、薬剤の選択や症状に応じた回数、時間等は、必ず主治医の適切な指示を受けて下さい。
- 製品は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。



製造元  
株式会社 河西医療電機製作所  
〈〒113〉東京都文京区湯島2丁目5番8号  
TEL. (03) 3814-5556  
FAX. (03) 3814-5529

代理店